




STAP 1

Vermijd eten, drinken, roken en tanden poetsen ten minste 30 minuten voor aanvang van de test. Alvorens de test te beginnen, was grondig uw handen.

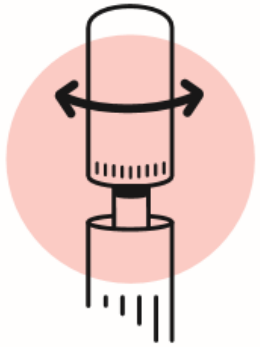


STAP 2

Draai en trek krachtig het steriele buisje open. Wees voorzichtig en raak de tip van het wattenstaafje niet aan met je vingers. Vermijd ook contact met andere voorwerpen om contaminatie te voorkomen.




STAP 3

Verzamel je speeksel door de tip van het wattenstaafje gedurende 1 minuut stevig rond te draaien tegen de binnenkant van je wang. **Herhaal dit proces vervolgens aan de andere kant.**

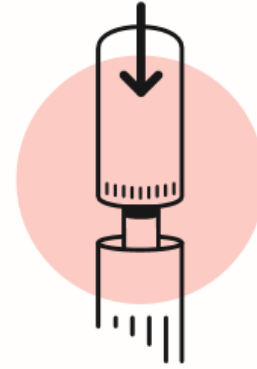

STAP 4

Onmiddellijk na het verzamelen van het speeksel, plaats het wattenstaafje terug in het buisje en klik het vast.

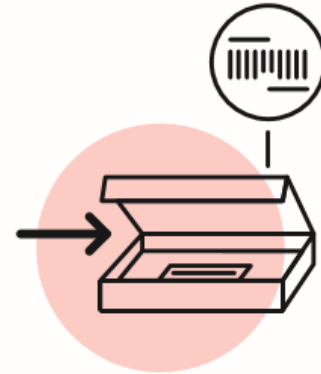

STAP 5

Plaats het buisje terug in het doosje en kleef het dicht. Kleef vervolgens de voorafbetaalde sticker met barcode bovenop de doos en geef de doos af in een postpunt in de buurt. Laat de barcode scannen, zodat we jouw pakketje kunnen traceren.

Je kan de status van jouw zending volgen door in de loggen op je Nomige account.